



Istruzione Operativa di Unità Operativa	IU 304255 15 LAB Rev. 2 del 20/01/2026 Pagina 1 di 3
DAI di Neuroscienze UOC Neurologia B – Laboratorio di Neuropatologia	
ISTRUZIONI PER L'INVIO DI CAMPIONI EMATICI E LIQUORALI	

INDIRIZZO DEL LABORATORIO	Laboratorio di Neuropatologia Palazzina sud, lato Ovest, Piano 1 Policlinico GB Rossi Piazzale L.A. Scuro 10 37134 Verona	
ORARIO DI RICEVIMENTO	DAL LUNEDÌ' AL GIOVEDÌ	8.30-14
	VENERDÌ'	8.30-13

I campioni spediti per corriere devono presentare un imballaggio con le caratteristiche indicate nella **Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici**. Quelli consegnati "brevi manu", un imballaggio costituito da un doppio contenitore, quello interno a tenuta e infrangibile, avvolto in materiale assorbente, quello esterno a tenuta stagna. L'imballaggio deve essere corredato da una scheda con i dati identificativi del contenuto, applicata in modo che non sia facilmente asportabile.

In nessun caso, il contenitore esterno deve presentare tracce del contenuto, nell'eventualità, il campione verrà respinto e segnalato come campione "NON CONFORME" nel registro NON CONFORMITÀ'.

I campioni ematici per immunologia devono pervenire al laboratorio entro 3 h dal prelievo. Qualora non fosse possibile rispettare tale tempistica, è necessario centrifugare i campioni come indicato nella tabella di seguito. Il siero ottenuto deve essere trasferito in criovials o eppendorf marcate con cognome e nome del paziente.

I campioni devono essere trasportati alla temperatura compresa tra +15 e +25°C con arrivo entro gli orari di apertura del laboratorio (lun- gio ore 8.30-14, ven ore 8.30-13). Si raccomanda l'utilizzo di 3 piastre eutettiche (siberina) di piccole dimensioni per il controllo della temperatura, da non posizionare a stretto contatto con i campioni.

Se non è possibile procedere alla spedizione del campione in giornata è necessario congelare i campioni di siero e liquor (-20°C) e farli pervenire al laboratorio congelati, utilizzando ghiaccio secco (almeno 1 kg) per assicurare la temperatura < -20°C.

I campioni ematici per estrazione DNA possono essere inviati entro 24 ore dal prelievo, non centrifugati, non congelati, nel range di temperatura 20±10°C.

Identificazione del campione: tutti i campioni devono essere identificati con cognome e nome del paziente, data di nascita, data del prelievo, scritti con pennarello indelebile o con apposizione di etichetta di ricovero. Evitare che l'etichetta copra completamente il contenuto della provetta per permettere di controllare quantità e idoneità del campione.

Esame richiesto	Documentazione necessaria
Esami su siero e liquor	• modulo di richiesta esame MU 70 correttamente compilata e firmata dal medico richiedente (timbro e firma del medico strutturato di riferimento) • autorizzazione della direzione Sanitaria per pazienti ricoverati/DH/AMID in strutture non AOUI Verona <i>oppure</i> • impegnativa cartacea o informatizzata con dicitura degli esami/codici richiesti per pazienti esterni/ambulatoriali
Analisi genetic	• per neuropatie MU 10 • per malattie del motoneurone/neurodegenerative MU 11 • per demenze MU 12 • per miopatie MU 13 • per distonie MU 14 • per Parkinson MU 15 • autorizzazione della direzione Sanitaria per pazienti ricoverati/DH/AMID in strutture non AOUI Verona <i>oppure</i> • impegnativa cartacea o informatizzata con dicitura degli esami/codici richiesti per pazienti esterni/ambulatoriali • MU 137, modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici e all'utilizzo dei campioni biologici per finalità diagnostiche e di ricerca. In caso di paziente minorenni consenso firmato da entrambi i genitori. • breve relazione clinica • albero genealogico • referti/copie di esami strumentali effettuati per la formulazione della diagnosi clinica

La modulistica sopra indicata è reperibile nel portale aziendale AOUI, Neurologia B, sezione Informazioni Generali – Documentazione:

<https://www.aovr.veneto.it/dipartimenti-sanitari/-/departments/neurologia-b/documentazione>

Nel caso arrivassero campioni non correttamente identificati, non correttamente processati o non correttamente conservati, verrà tempestivamente avvisata la UO inviante e concordato, se possibile, un ulteriore invio di materiale.