



Istruzione Operativa di Unità Operativa	IU 301565 59 Rev. 4 del 03/01/2024 Pagina 1 di 1
DAI di PATOLOGIA e DIAGNOSTICA UOC di MICROBIOLOGIA	
ISTRUZIONI PER PRELIEVO QUANTIFERON	

ITER EMISSIONE	E. O.	RUOLO	NOME COGNOME	FIRMA
REDAZIONE*	UOC Microbiologia e Virologia	Coordinatore	Laura Poletto	
VERIFICA*	UOC Microbiologia e Virologia	Referente Qualità Dirigente medico	Sonia Tozzi Annarita Sorrentino	
APPROVAZIONE*	UOC Microbiologia e Virologia	Direttore	Davide Gibellini	
DATI GESTIONE DOCUMENTO				
NOME FILE	IU 301565 59			
DATA PRIMA APPLICAZIONE	19/10/2011			
DISTRIBUZIONE	Controllata X			

versione modificata rispetto alla revisione precedente

1. Richiedere le provette dedicate Quantiferon -TB Gold IT presso il magazzino del Polo Chirurgico il mercoledì per la sede BT o presso l'UOC di Microbiologia e Virologia sede BR accettazione materiale. Le provette possono essere mantenute a temperatura ambiente
2. Preparare per ogni soggetto le provette dedicate:
1 tappo grigio
1 tappo giallo
1 tappo verde
1 tappo viola
3. Eseguire il prelievo facendo defluire nelle provette 1 ml di sangue: la linea nera sul lato delle provette indica il volume necessario che DEVE essere rispettato.
Attenzione: le provette sono di tipo Vacutainer ma il sangue defluisce lentamente perché hanno poco vuoto. Se si usa ago a farfalla, è opportuno verificare con una provetta vuota che tubo sia riempito di sangue.
4. Miscelare accuratamente il contenuto delle provette capovolgendole per 10 volte e verificando che l'intera superficie interna della provetta sia ricoperta di sangue.
5. Etichettare le provette sulle etichette già esistenti in modo da permettere di controllare il volume prelevato.
6. Inserire la richiesta in Order Entry-Sio come "indagine immunologia infezione tubercolare (quantiferon)" e inviare il prelievo entro le 10:00 dal lunedì al venerdì al Servizio di Microbiologia in Borgo Roma oppure in Borgo Trento.